



VULPES GOODS

BABYCARE

GEHOORBESCHERMERS

De oorbeschermers gebruiken

Stap 1: Klap de zijkanten van de oorbeschermers open. Plaats de band en klap de zijkanten dicht.

Stap 2: Kies de juiste maat voor het hoofd en bevestig met klittenband.

Stap 3: Let op: Zorg dat de band niet te strak zit. Dit kan gevolgen hebben zoals ernstige hoofdpijn en een mindere werking van de oorbeschermers.

Let op:

- Zorg dat de band niet te strak zit. Dit kan gevolgen hebben zoals ernstige hoofdpijn en een mindere werking van de oorbeschermers.
- Check altijd of de zijkant correct zijn gesloten. Dit voorkomt dat de klep openvalt en de oorbeschermers vallen.
- Check zorgvuldig of de oorbeschermers volledig over het oor valt. Gebeurt dit niet? Dan is er kans op gehoorschade.
- Laat de oorbeschermers niet vallen, dit kan resulteren in een defecte oorbeschermers.
- Vervoer de oorbeschermers altijd veilig in de reistas om de kans op schade te voorkomen.

Geluidsreductie: 25 dB

