

MASSAGE CHAIR

Galini

—MR580—

Lesen Sie auf den Seiten 11-15 nach, wie Sie die einzelnen Teile des Massagesessels zusammenbauen.

Kategorie: Maschinen und Geräte Allgemeine
Bezeichnung: Elektrische Massagesessel für den Heimgebrauch



Vor Gebrauch


- WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 2
- Massagesessel aufstellen 9
- So installieren Sie die Armlehnen 11
- Vor Gebrauch 13
- Bezeichnungen und Funktionen der einzelnen Teile 16

Anwendung

- Automatikprogramme 16
- Manuelle Massage 22
- Massage anpassen 26

Überprüfung und Wartungsmethoden

- Reinigung und Wartung 27
- Einstellungen 28
- Technische Daten 29

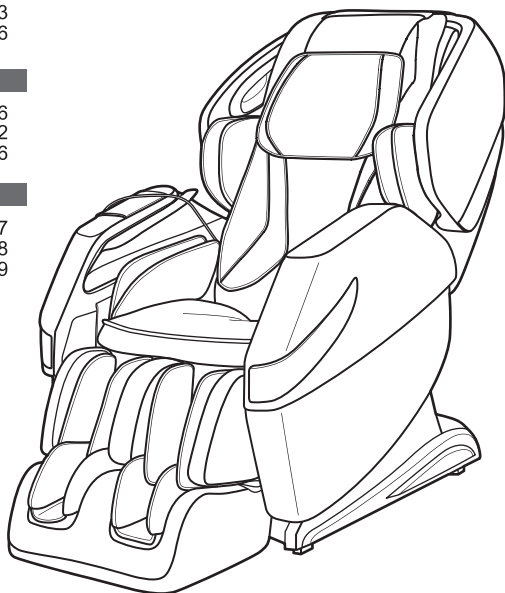



Verwendungszweck, Wirkung

Einsatz für Massage zu Hause



- Vielen Dank, dass Sie sich für den SYNCA Massagesessel entschieden haben.
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie den Sessel nur wie angegeben.
- Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Sicherheitshinweise auf den Seiten 2-7.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem Ort auf, an dem sie für spätere Bezugnahme leicht zugänglich ist.
- Wenn möglich, recyceln Sie das äußere Verpackungsmaterial.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese "Wichtigen Sicherheitshinweise" vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig durch.
- Diese wichtigen Sicherheitshinweise sind erforderlich, um die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts sicherzustellen und Verletzungen und Schäden des Benutzers und anderer Personen zu vermeiden.
- Nachfolgend finden Sie die Symbole und deren Bedeutung.
- Bitte beachten Sie die Hinweise, da es sich um wichtige Anweisungen für Ihre Sicherheit handelt.

 GEFAHR	Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
 WARNUNG	Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen oder Eigentumsschäden führen.

*Eigentum bezieht sich auf Häuser, Haushaltsgegenstände, Hof- und Haustiere.



	<p>⊘ Verbotene Handlungen Die verbotene Handlung ist in der Abbildung dargestellt (z.B. bezieht sich die Abbildung links auf „Verbot der Demontage“).</p>
	<p>● Vorgeschriebene Handlungen Die vorgeschriebene Handlung ist in der Abbildung dargestellt (z.B. bezieht sich die Abbildung links auf „Ziehen des Netzsteckers“).</p>

- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer an einem Ort auf, an dem sie für eine Bezugnahme leicht zugänglich ist.
- **Achtung:** Bei der Entsorgung dieses Produkts und/oder des Zubehörs sind die örtlichen Gesetze und Vorschriften zu beachten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde.

 GEFAHR	
	<p>Da dieses Gerät über eine integrierte Heizung verfügt und die Oberfläche heiß wird, sollte es nur von Personen benutzt werden, die nicht empfindlich auf Wärme reagieren. Dies gilt insbesondere für die folgenden Personen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ältere, kranke Personen oder Personen, die sich nicht selbst bewegen können • Personen, die Medikamente einnehmen, die Schläfrigkeit verursachen (Schlaftabletten, Erkältungsmedikamente) • Personen mit starkem Alkoholkonsum, starker Müdigkeit • Personen mit Blutkrankheiten (Diabetes usw.) • Personen, die einen Hinweis vom Arzt erhalten • Personen mit schwachem Temperaturempfinden. <p>Es besteht die Gefahr von leichten Verbrennungen oder Dehydration.</p>
	<p>Die folgenden Personen sollten vor der Anwendung dieses Produkts einen Arzt konsultieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personen, die ein medizinisches elektronisches Gerät im Körper tragen, wie z.B. einen Herzschrittmacher, der empfindlich auf elektromagnetische Störungen reagiert. • Personen mit bösartigen Tumoren. • Personen mit Herzkrankheiten. • Personen, die schwanger sind oder kurz nach der Geburt. • Personen mit Parästhesien, die mit peripheren Durchblutungsstörungen aufgrund von Diabetes usw. zusammenhängen. • Personen mit Wunden auf der Haut. • Personen, die Ruhe brauchen. • Personen mit Verlust des Temperatursinns. • Personen mit Körpertemperaturen über 38°C. (wenn starke akute Entzündungssymptome, Unwohlsein, Schwindel, Blutdruckschwankungen beobachtet werden, wenn geschwächt). • Personen mit Bandscheibenvorfall. • Personen mit Sehenscheidenentzündung. • Personen mit Osteoporose, Wirbelbrüchen oder akuten Schmerzen. • Personen mit Anomalien der Wirbelsäule oder Wirbelsäulenverkrümmung. • Personen mit Anomalien am Körper, die oben nicht aufgeführt sind, Personen in ärztlicher Behandlung.



GEFAHR

	<p>Wenn sich der Sessel nicht mehr bewegen lässt oder ein Problem auftritt, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie den Sessel gekauft haben, um eine Inspektion/Reparatur durchführen zu lassen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Kurzschlusses oder eines Brandes.</p>
	<p>Achten Sie auf die Bewegungen der Massageköpfe, wenn Sie den Hals massieren. Vermeiden Sie eine übermäßige Massage oder eine Massage der Vorderseite des Halses. Es könnte zu Unfällen oder Verletzungen kommen.</p>
	<p>Beim Zurücklehnen oder Absenken der Fußraste immer die Umgebung der Fußraste auf Personen, Haustiere und andere Gegenstände überprüfen. Es könnte zu Unfällen oder Verletzungen kommen.</p>
	<p>Achten Sie beim Zurücklehnen oder Absenken der Fußstütze darauf, dass Sie nicht mit Händen, Fingern, Füßen oder dem Kopf an der Fußstütze oder Rückenlehne hängen bleiben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • unter dem Sessel selbst. • Rückenlehne, Sitz, Freiraum der Armlehne. • Freiraum der Fußstütze, Sitz, Armlehne. • unter der Fußstütze, der Rückseite der Fußstütze. • Freiraum zwischen Arm und Armlehne. • hinter der Rückenlehne. <p>Es könnte zu Unfällen oder Verletzungen kommen.</p>
	<p>Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass der Bezug der Rückenlehne keine Risse aufweist. (Wenn Sie auch nur einen kleinen Riss oder Sprung feststellen, stellen Sie die Benutzung sofort ein, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Produkt reparieren.) Wenn Sie das Gerät mit Rissen im Stoff der Rückenlehne weiter benutzen, kann es zu Stromschlägen oder Verletzungen kommen.</p> <p>Ziehen Sie den Netzstecker immer sofort nach Gebrauch und vor der Reinigung aus der Steckdose.</p>
	<p>Heizung nicht über einen längeren Zeitraum an der gleichen Körperstelle verwenden Wenn die Heizung über einen längeren Zeitraum an derselben Stelle verwendet wird, kann es zu Verbrennungen kommen, auch wenn die Temperatur vergleichsweise niedrig ist (40-60°C). Über Verbrennungen bei niedrigen Temperaturen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbrennungen bei niedrigen Temperaturen betreffen den tieferen Teil der Haut und zeigen rote Flecken oder Blasen. • Bei Rötung oder Blasenbildung sofort einen Arzt aufsuchen.
	<p>Den folgenden Personen wird dringend empfohlen, dieses Produkt nicht zu verwenden. Personen, denen eine Massage ärztlich untersagt ist. (z.B. Personen mit Thrombose, schweren Aneurysmen, akuten Krampfadern, verschiedenen Arten von Hautentzündungen und Hautinfektionen (einschließlich Entzündungen des Unterhautgewebes) usw.).</p>
	<p>Die Bezüge (Rückenlehne, Fußstütze) des Sessels dürfen nicht mutwillig entfernt, zerrissen oder zerschnitten werden. Benutzen Sie den Sessel niemals mit entferntem oder zerrissem Bezug, da sich Kleidung und Haare in den Massageköpfe verfangen könnten.</p>
	<p>Betreiben Sie den Sessel nur mit der angegebenen Spannung. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.</p>
	<p>Benutzen Sie den Sessel nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind oder die Steckdose locker ist. Wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, um das Gerät reparieren zu lassen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, einer Fehlfunktion oder sogar eines Brandes.</p>
	<p>Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose und halten Sie ihn von Staub fern. Nichtbeachtung kann zu Schäden, Bränden und elektrischen Schlägen führen.</p>
	<p>Erlauben Sie nicht, dass unbeaufsichtigte Kinder oder Personen, die nicht in der Lage sind, ihre Absichten zu erklären, diesen Sessel benutzen. Lassen Sie kleine Kinder nicht in die Nähe des Sessels. Es besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr.</p>
	<p>Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Sessel zu spielen oder darauf zu sitzen. Es könnte zu Unfällen oder Verletzungen kommen. Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder aus. Es besteht Stromschlaggefahr.</p>

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR




	Verwenden Sie niemals Stifte oder andere metallische Befestigungselemente für dieses Gerät.
	Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch sorgfältig die Abdeckung. Entsorgen Sie das Gerät, wenn die Abdeckung Verschleißerscheinungen wie Risse, Blasenbildung oder Brüche aufweist.
	Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in Badezimmern oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen, Feuer, Unfällen und Schimmelbildung.
	Das Gerät niemals selbst umbauen oder zerlegen/reparieren. Es besteht Brand- und Verletzungsgefahr.



WARNUNG

	Die Verwendung dieses Produkts sollte auf 30 Minuten pro Anwendung begrenzt werden. Die ununterbrochene Anwendung am gleichen Körperteil sollte auf 5 Minuten begrenzt werden. Eine längere Anwendung könnte Muskeln und Nerven schädigen. (Nur 30 Minuten pro Tag anwenden).
	Die folgenden Personen sollten vor der Anwendung dieses Produkts einen Arzt konsultieren. <ul style="list-style-type: none"> • Personen mit altersbedingter Muskelschwäche und schlanke Personen. • Personen mit Schmerzen im unteren Rückenbereich, die durch Knochen oder innere Organe verursacht werden. • Personen, die leicht zu Prellungen und Verstauchungen neigen. • Personen, die unter starker Reisekrankheit leiden. • Personen, die sich einer Operation an inneren Organen oder am Herzen unterzogen haben.
	Treten nach der Anwendung dieses Produktes Hautausschläge, Hautrötungen, Juckreiz oder ähnliche Symptome auf, ist die Anwendung sofort zu beenden und ein Arzt aufzusuchen. Unfälle und gesundheitliche Schäden könnten die Folge sein.
	Lassen Sie ein angeschlossenes Gerät niemals unbeaufsichtigt. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie Teile montieren oder demontieren. Schalten Sie alle Bedienelemente aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Andernfalls kann es zu Unfällen durch unachtsame Kinder kommen
	Verwenden Sie den Sessel nur auf ebenem Untergrund. Nicht im Freien verwenden. Dies kann zu Schäden oder Unfällen führen.
	Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die Bedienknöpfe und Timer einwandfrei funktionieren. Andernfalls könnte es zu Unfällen oder Verletzungen kommen.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung durch und vergewissern Sie sich, dass das Produkt normal funktioniert, bevor Sie den Sessel nach längerer Nichtbenutzung wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls könnte es zu Unfällen oder Verletzungen kommen.
	Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass keine Gegenstände im Sessel (Rückenlehne, Fußstütze, Armlehne) eingeklemmt sind. Lassen Sie niemals einen Gegenstand in eine Öffnung fallen oder hineinstecken. Andernfalls könnte es zu Unfällen oder Verletzungen kommen.
	Legen Sie Ihre Füße oder Hände nicht auf die Fußstütze, wenn diese eingeklappert wird. Andernfalls könnte es zu Unfällen oder Verletzungen kommen.
	Sollten während des Gebrauchs körperliche Beschwerden auftreten oder bemerkbar werden, stellen Sie die Benutzung des Produkts sofort ein und suchen Sie einen Arzt auf.
Setzen Sie sich langsam hin, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass sich die Massageköpfe in der Ablageposition befinden. Andernfalls könnte es zu Unfällen oder Verletzungen kommen.	
Verwenden Sie zu Beginn der Anwendung eine schwache Stimulationsmassage. Andernfalls könnte es zu Verletzungen kommen.	

! WARNUNG

	Stellen Sie sicher, dass der Erdungsanschluss installiert ist. Wenn der Erdungsanschluss nicht installiert ist, kann es zu Schäden oder einem elektrischen Schlag kommen.
	Schalten Sie den Netzschalter AUS und ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist. Wenn die Stromversorgung wieder hergestellt wird, könnte es zu Unfällen kommen.
	Ziehen Sie den Netzstecker am Stecker und nicht am Kabel. Andernfalls besteht Stromschlag-, Kurzschluss- oder Brandgefahr.
	Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Sessel nicht benutzen. Es besteht Brandgefahr, wenn die Isolierung durch Staub oder Feuchtigkeit beschädigt wird.
	Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie den Sessel warten. Andernfalls könnte es zu einem elektrischen Schlag oder Verletzungen kommen.
	Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn die Lüftungsöffnungen blockiert sind. Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von Staub, Haaren und ähnlichem.
	Lassen Sie niemals einen Gegenstand in eine Öffnung fallen oder hineinstecken.
	Schalten Sie alle Bedienelemente aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
	Das Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt.
	Unabhängig von der Einstellung des Reglers können hohe Temperaturen entstehen, die zu Verbrennungen führen könnten. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kleinkindern, Behinderten, schlafenden oder bewusstlosen Personen. Verwenden Sie das Gerät nicht bei empfindlicher Haut oder bei Personen mit schlechter Durchblutung. Kontrollieren Sie häufig die Haut, die mit dem erwärmten Teil des Geräts in Berührung kommt, um das Risiko von Blasenbildung zu verringern.
	Nicht quetschen - scharfe Falten vermeiden.
	Das Netzkabel oder den Netzstecker nicht beschädigen. <ul style="list-style-type: none"> • Nicht verletzen. • Nicht beschädigen. • Nicht bearbeiten. • Nicht unsachgemäß biegen oder ziehen. • Nicht verdrehen. • Nicht verknoten. • Keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel stellen. • Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird, insbesondere beim Bewegen des Sessels. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur zu einem Kundendienstzentrum. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, einer Fehlfunktion oder sogar eines Brandes.
	Benutzen Sie das Gerät nicht unmittelbar nach dem Essen oder Alkoholgenuss. Dies könnte zu Übelkeit, Krankheit, Unfällen oder Verletzungen führen.
	Benutzen Sie den Sessel nicht in der Nähe von Öfen oder anderen Feuerquellen und rauchen Sie nicht, während Sie den Sessel benutzen. Nicht auf beheizten Teppichen oder anderen Heizgeräten verwenden. Nicht unter einer Decke oder einem Kissen betreiben. Eine übermäßige Erwärmung kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen führen. Das Kabel von heißen Oberflächen fernhalten. Andernfalls könnte es zu einem Feuer kommen.
	Stellen Sie sich nicht auf den Sessel und steigen Sie nicht auf die Rückenlehne, die Fußstütze, die Armlehnen oder die Schultern des Sessels. Der Benutzer oder der Sessel können umkippen, was zu Verletzungen oder Unfällen führen könnte.
	Setzen Sie sich nicht auf den oberen Teil der Rückenlehne, die Vorderseite des Sessels oder die Fußstütze, wenn der Sessel nach hinten geneigt ist. Der Benutzer oder der Sessel können umkippen, was zu Verletzungen oder Unfällen führen könnte.
	Versuchen Sie nicht, sich bei zurückgelehntem Sessel oder hochgeklappter Fußstütze aufzusetzen oder aufzustehen. Der Benutzer oder der Sessel können umkippen, was zu Verletzungen oder Unfällen führen könnte.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG

	<p>Verwenden Sie kein anderes als das mit dem Sessel mitgelieferte Zubehör. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Produkts kommen.</p>
	<p>Benutzen Sie den Sessel nicht, wenn Sie Ohringe, Halsketten, Schals oder anderen Schmuck tragen. Dies könnte zu Verletzungen führen.</p>
	<p>Benutzen Sie den Sessel nicht, wenn Sie harte Gegenstände, wie z.B. Haarschmuck, auf dem Kopf tragen. Dies könnte zu Verletzungen führen.</p>
	<p>Verwenden Sie die Oberschenkel- oder Hüftmassage nicht mit harten Gegenständen in den Taschen. Dies könnte zu Unfällen und Verletzungen führen.</p>
	<p>Benutzen Sie das Gerät nicht nackt. Direkte Massagen am nackten Körper können die Haut schädigen.</p>
	<p>Verwenden Sie das Gerät nicht an Ellenbogen, Knien, Kopf und Bauch. Fassen Sie nicht mit Händen oder Füßen in die Massageköpfe. Dies könnte zu Verletzungen führen.</p>
	<p>Ziehen Sie nicht das Netzkabel heraus und schalten Sie den Netzschalter nicht aus, während Sie den Sessel benutzen. Dies könnte zu Unfällen und Verletzungen führen.</p>
	<p>Schlafen Sie nicht, während Sie den Sessel benutzen. Dies könnte zu gesundheitlichen Schäden oder Verletzungen führen.</p>
	<p>Bewegen Sie den Sessel nicht, wenn sich Personen oder Gegenstände auf dem Sessel befinden. Es könnte zu Unfällen oder Verletzungen kommen.</p>
	<p>Achten Sie darauf, dass sich nicht mehr als 1 Person gleichzeitig auf dem Sessel befindet. Andernfalls könnte es zu Schäden am Sessel oder zu Verletzungen kommen.</p>
	<p>Wischen Sie den Sessel nicht mit Benzin, Verdünner oder Alkohol ab und sprühen Sie ihn nicht mit pharmazeutischen Sprays ein. Dies könnte zu einem Feuer oder elektrischem Schlag führen.</p>
	<p>Nicht für andere Zwecke als die Massage verwenden. Andernfalls könnte es zu Schäden oder Unfällen kommen.</p>
	<p>Benutzen Sie keine anderen therapeutischen Geräte, während Sie dieses Produkt benutzen. Dies könnte zu gesundheitlichen Schäden oder Unfällen führen.</p>
	<p>Den Sessel nicht selbst oder mit den Rädern über den Boden schieben. Dadurch könnte es leicht zu Kratzern kommen.</p>
	<p>Kippen Sie den Sessel nicht und setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus. Es könnte zu Unfällen oder Verletzungen kommen.</p>
	<p>Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.</p>
	<p>Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.</p>
<p>Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel und verwenden Sie das Kabel nicht als Griff.</p>	
<p>Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn die Lüftungsöffnungen blockiert sind. Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von Staub, Haaren und ähnlichem.</p>	
<p>Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern, Kranken oder Behinderten verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.</p>	



WARNUNG



Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur zu einem Kundendienstzentrum.

Das Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.

Heiße Oberflächen mit Vorsicht behandeln. Kann zu schweren Verbrennungen führen. Verwenden Sie das Gerät nicht auf unempfindlicher Haut oder bei schlechter Durchblutung. Der unbeaufsichtigte Gebrauch von Wärme durch Kinder oder geschwächte Personen kann gefährlich sein.

Halten Sie Kinder von ausgeklappten Fußstützen, Rückenlehnen (oder ähnlichen Teilen) fern.

Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Siehe Anweisungen zur Erdung.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von ihr Anweisungen erhalten, wie das Gerät zu benutzen ist.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht unbeaufsichtigt durchgeführt werden.

Bitte nicht mit hoher Lautstärke hören.
Längeres Hören bei hoher Lautstärke kann das Gehör schädigen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Anweisungen zur Erdung

⚠ GEFAHR


Bei unsachgemäßem Anschluss des Erdungsleiters besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn Sie nicht sicher sind, ob das Gerät richtig geerdet ist. Verändern Sie nicht den mit dem Produkt gelieferten Stecker - wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, lassen Sie eine geeignete Steckdose von einem Elektriker installieren.

⚠ WARNUNG

Das Gerät muss ordnungsgemäß geerdet werden. Wenn das Gerät nicht geerdet ist, kann es im Falle einer Fehlfunktion oder eines Kurzschlusses zu einem Stromschlag kommen

- ※ Das Gerät muss geerdet werden. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls bietet die Erdung den geringsten Widerstand für den elektrischen Strom, um das Risiko eines Stromschlages zu verringern. Dieses Produkt ist mit einem Kabel mit Erdungsleiter und geerdetem Stecker ausgestattet. Der Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden, die den örtlichen Vorschriften entspricht.

Erdungsmethoden

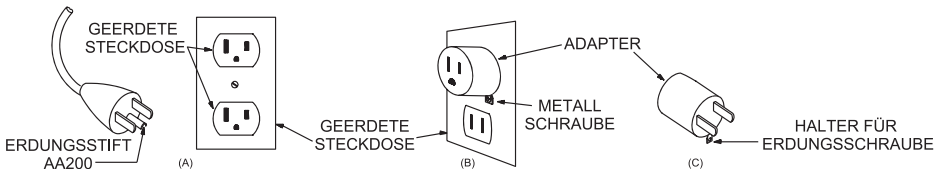

- ※ Dieses Produkt ist für den Einsatz in einem 120-V Nennstromkreis vorgesehen und verfügt über einen Erdungsstecker wie in Skizze A in Abbildung 86.1 dargestellt. Wenn keine ordnungsgemäß geerdete Steckdose zur Verfügung steht, kann vorübergehend ein Adapter, wie in den Skizzen B und C dargestellt, verwendet werden, um diesen Stecker an eine 2-polige Steckdose, wie in Skizze B dargestellt, anzuschließen. Der Adapter sollte nur vorübergehend verwendet werden, bis eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose (Skizze A) von einem qualifizierten Elektriker installiert werden kann. Der aus dem Adapter ragende starre grüne Ring, die Lasche o.ä. muss mit einer dauerhaften Erdung verbunden werden, z.B. mit einer ordnungsgemäß geerdeten Steckdosenabdeckung. Wenn der Adapter verwendet wird, muss er mit einer Metallschraube befestigt werden.

Wenn die Steckdose nicht geerdet ist

Wenden Sie sich vor dem Kauf an ein Elektrofachgeschäft oder einen Händler und führen Sie die Erdung durch (Installationsarbeiten/Kosten Klasse D<Klasse D>).

Massagesessel aufstellen


Erforderlicher Platz für Installation

Achten Sie darauf, dass genügend Platz zum Kippen des Massagesessels vorhanden ist und dass die Rückseite des Massagesessels mindestens 35 cm (14 Zoll) von der Wand entfernt ist.

Setzen Sie den Massagesessel nicht direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus (- z.B. vor Heizkörpern). Bei längerem Gebrauch an einem Ort empfehlen wir die Verwendung von weichen Kissen. Wenn die Matte flach ausgelegt wird, muss sie so groß sein, dass sie den Bereich, in dem das Produkt den Boden berührt, und den Bereich, in dem die Füße den Boden berühren, abdeckt.

 **ACHTUNG**

35 cm
(14 Zoll)

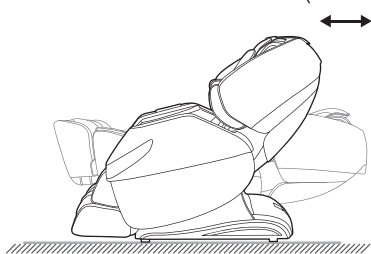


Anheben des Massagesessels

Stützen Sie die Unterseite des Sessels ab, heben Sie ihn an und bewegen Sie ihn. Da das Gerät schwer ist, sollten Sie beim Tragen vorsichtig sein, um Ihren Rücken nicht zu belasten. (Dieses Gerät muss von zwei oder mehr Personen getragen werden.)

1. Heben Sie den Massagesessel an, um ihn auf empfindlichen Oberflächen wie Holzböden zu bewegen.
2. Beim Bewegen auf Holzböden wird empfohlen, den Sessel anzuheben, um Beschädigungen des Bodens durch die Rollen zu vermeiden. Beim Anheben und Bewegen des Sessels in eine bestimmte Position und beim Absenken des Sessels. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und Füße nicht im Weg sind, um schwere Verletzungen zu vermeiden. Lassen Sie das Gerät erst los, wenn es vollständig auf dem Boden steht, um Beschädigungen des Bodens zu vermeiden. Es wird empfohlen, Matten oder andere Schützer auf den Boden zu legen.

 **ACHTUNG**

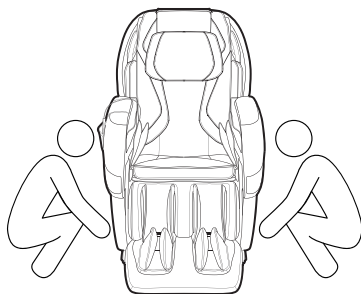


Massagesessel aufstellen

Bewegen des Sessels durch eine Person

Benutzen Sie die hinteren Rollen, um den Massagesessel zu bewegen. Kippen Sie den Sessel wie in der Abbildung gezeigt um ca. 45° nach unten und nach hinten, um ihn zu bewegen.


Hinweis: Nicht zu stark nach unten drücken, um Beschädigungen am Produkt oder Verletzungen der tragenden Person durch Herunterfallen des Sessels zu vermeiden.

1. Schalten Sie das Gerät vor dem Bewegen ordnungsgemäß aus, stellen Sie die Rückenlehne und die Beinstützen vollständig zurück und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Während des Transports muss das Produkt leer sein. Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Haustiere oder Gegenstände auf dem Gerät befinden.
3. Wenn Sie die Rollen zum Bewegen des Sessels verwenden, vermeiden Sie Hindernisse, die höher als 2,5 cm (1 Zoll) oder breiter als 2,5 cm (1 Zoll) sind.
4. Die Rollen sind nicht für große Entfernungen ausgelegt. Bei Entfernungen von mehr als 50 Metern sollte das Produkt langsam und gleichmäßig in kurzen Abschnitten bewegt werden.

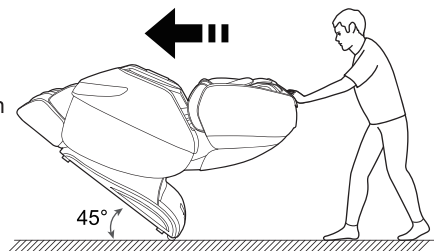


So installieren Sie die Armlehnen


1. Öffnen Sie den Reißverschluss am Seitenteil bis zur gezeigten Position in der Abbildung.

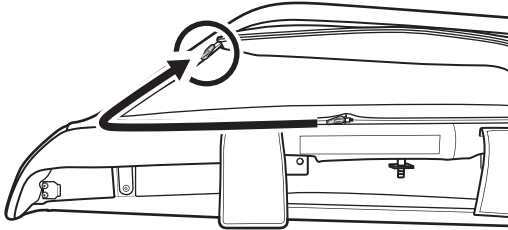

2. Befestigen Sie den Haken des Seitenteils am Metallbeschlag auf der Rückseite der Armlehne.

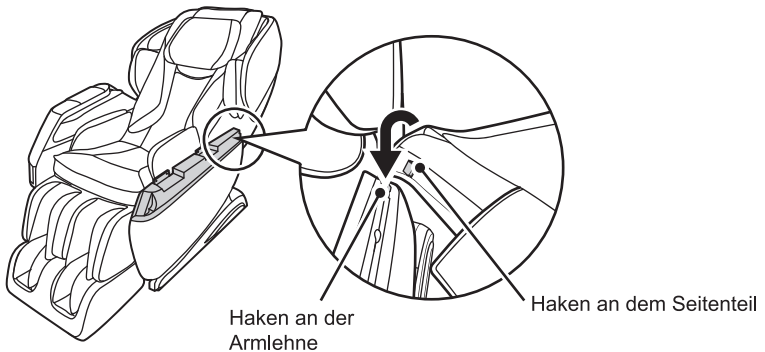


3. Verbinden Sie die Luftschläuche der Armlehne und des Seitenteils und platzieren Sie dann das Seitenteil auf der Armlehne.

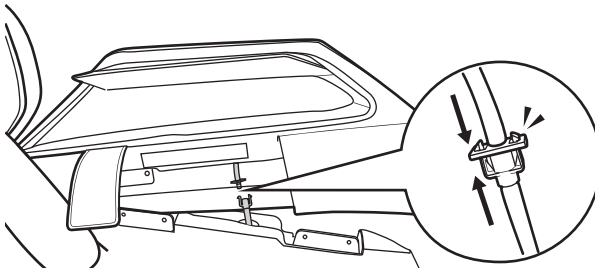


So installieren Sie die Armlehnen

4. Befestigen Sie die Seitenteile an den Armlehnen, indem Sie die Schrauben in der Reihenfolge 1→2→3→4 festziehen und dann den Reißverschluss an den Armeinheiten schließen.

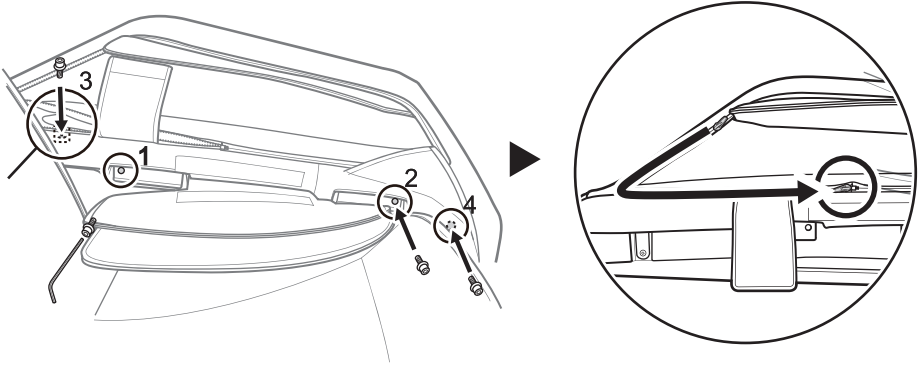

5. Verdecken Sie die Schrauben mit der Stoffabdeckung (2 Stellen) und befestigen Sie den Seitensitzairbag mit Klettverschluss an der Armlehne.

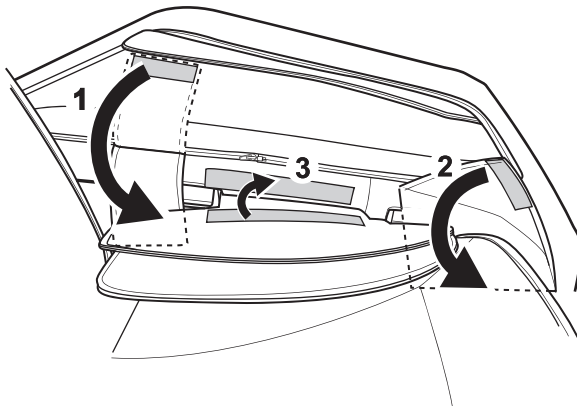


Vor Gebrauch

Umgebung überprüfen

Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen, Haustiere oder andere Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.



ACHTUNG

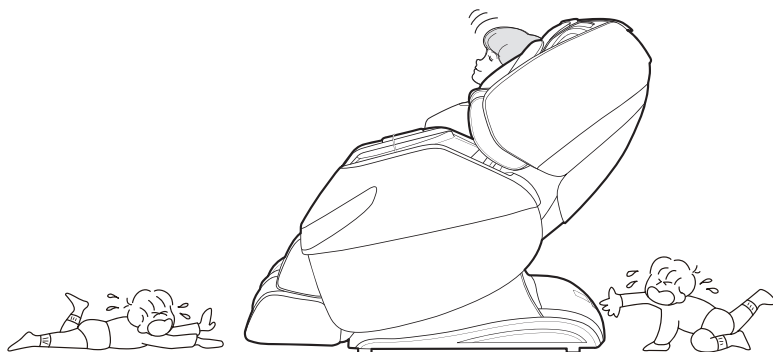

Vor Gebrauch

Einklemmschutz: Einklemmschutzsystem

Beschreibung des Einklemmschutzes


Bei diesem Gerät ist der untere Teil der Rückenlehne mit einer Einklemmschutzfunktion ausgestattet. Wird der Einklemmschutz während der Liege-/Aufstehbewegung von einem Gegenstand berührt, wird die Einklemmschutzfunktion aktiviert und das Gerät in den Fehlermodus wechseln. Bitte entfernen Sie den Gegenstand unter der Armlehne.



ACHTUNG

Integrierter Einklemmschutz
Sensorleiste.

Einklemmschutz Sensorposition
zwischen Rückenlehne und unterer
Abdeckung.

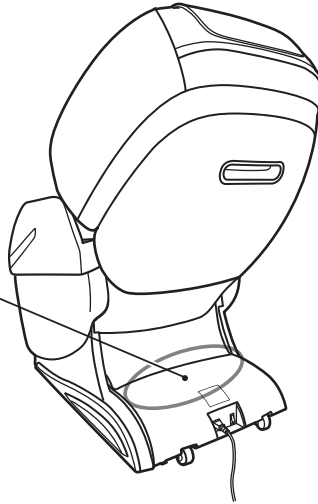


Vor Gebrauch


Gerät einschalten




ACHTUNG

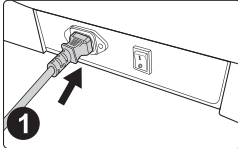

1 Anschluss des Netzkabels an den Sessel

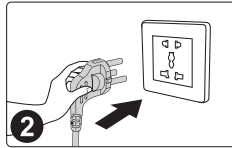

2 Anschluss an Stromquelle

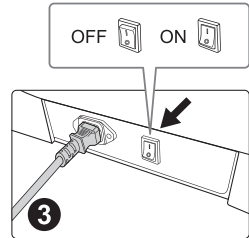

3 Einschalten des Netzschalters (Stellung „I“)



GEFAHR

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das Netzkabel und den Netzstecker auf Beschädigungen.


Bitte versorgen Sie das Gerät mit Strom gemäß den kalibrierten Leistungsanforderungen des Geräts.

Es ist strengstens untersagt, eine andere als die für dieses Produkt vorgesehene Stromversorgung zu verwenden.

Es ist strengstens untersagt, andere Stromumwandlungsgeräte ohne Genehmigung an die Stromversorgung dieses Produkts anzuschließen.


Bezeichnungen und Funktionen der einzelnen Teile

Sessel

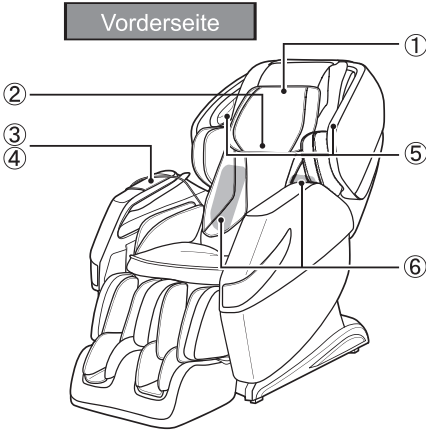


- ① Die Kopfstütze klappt während der Massage nach hinten.
- ② Rückenlehne Lehnen Sie sich bequem auf der Rückenlehne zurück.
- ③ Fernbedienung Zum Starten der Massage.
- ④ Controller Aufbewahrungstasche Verstauen Sie den Controller.
- ⑤ BLUETOOTH Lautsprecher Genießen Sie Musik über BLUETOOTH.
- ⑥ Heizung Integrierte Heizung im Rückenpolster.

Rückseite

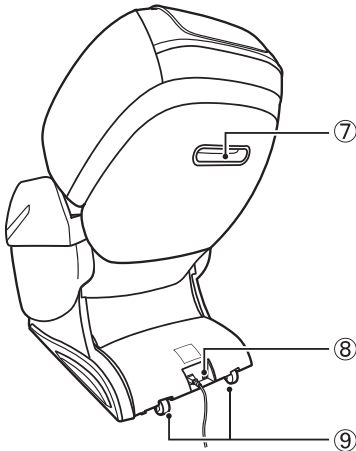

- ⑦ Griff Zum Festhalten während des Hochhebens.
- ⑧ Netzschalter Schaltet das Gerät ein und aus.
- ⑨ Rollen zum Bewegen


Massagebereich

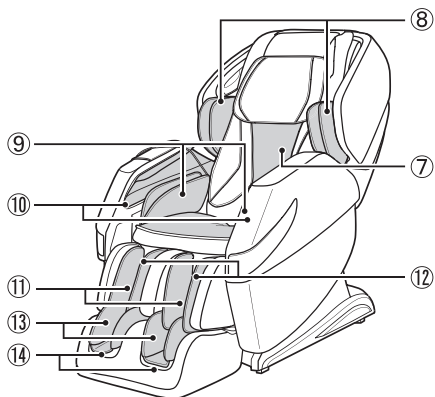



- ⑦ **Rückenlehne**
Massiert den gesamten Rücken mit den Massagekugeln.
- ⑧ **Schulterbereich**
Luftmassage für die Schultern.
- ⑨ **Sitzseite**
Luftmassage rund um das Becken.
- ⑩ **Arm**
Luftmassage der Unterarme von den Handflächen.
- ⑪ **Wade**
Luftmassage der Waden.
- ⑫ **Rückseite der Wade**
Rollmassage der Wadenrückseite.
- ⑬ **Knöchelbereich**
Luftmassage der Knöchel.
- ⑭ **Fußsohle**
Rollmassage der Fußsohle.

Bezeichnungen und Funktionen der einzelnen Teile


Fernbedienung

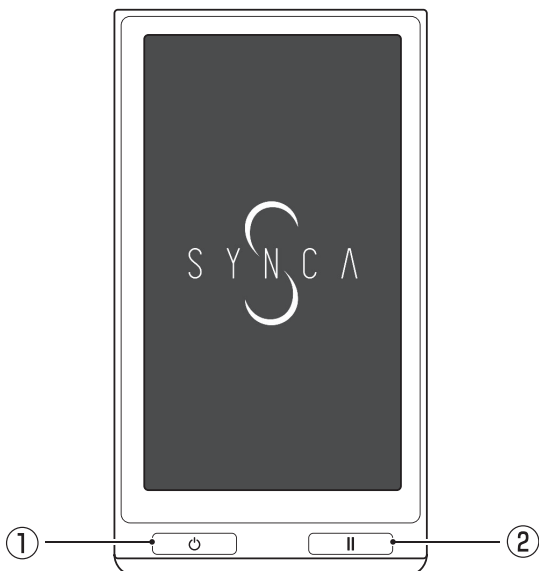

•Message Auswahl

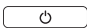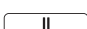①		Ein/Aus Taste	Gerät ein-/ausschalten
②		Start/Stopp Taste	Drücken, um die Massage sofort zu stoppen, und erneut drücken, um sie fortzusetzen.

Fernbedienung: Startmenü

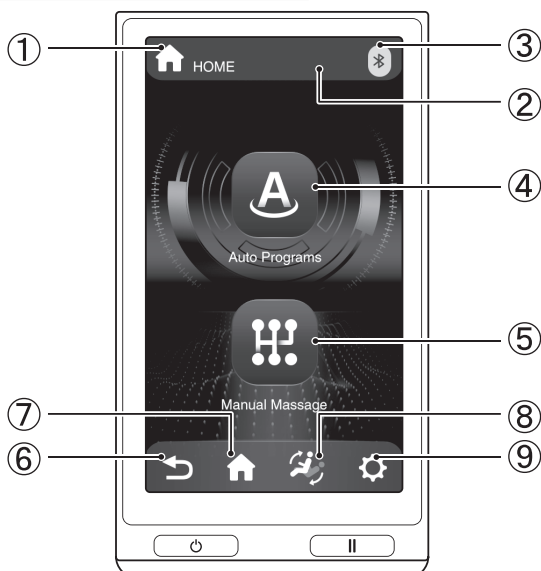

• Statusbereich

①		Auswahlanzeige	Anzeige der aktuellen Auswahl
②		Timer Anzeigebereich	Anzeige der verbleibenden Massagezeit
③		Bluetooth Anzeige	Anzeige des Status der Bluetooth Verbindung

• Massage Auswahl

④		Automatikprogramme	Es kann zwischen 12 Arten von Automatikprogrammen gewählt werden
⑤		Manuelle Massage	Manuelle Auswahl der bevorzugten Massageoptionen

• Werkzeuge

⑥		Zurück Taste	Rückkehr zum Massagebetrieb Bildschirm
⑦		Startseite	Anzeige des Startbildschirms
⑧		Liegen	Einstellen der Liegeoptionen
⑨		Einstellungen	Verschiedene Einstellungen öffnen





Anwendung

Anpassung der Rückenlehne

1. Drücken Sie die Taste für die Rückenlehnenverstellung und stellen Sie die Rückenlehne wie gewünscht ein.






• Zur manuellen Verstellung die Taste gedrückt halten.

 	Rückenlehne Taste	Winkel der Rückenlehne einstellen.
 	Beinverstellung Taste	Verstellt den Winkel der Beine.

Zur automatischen Einstellung eines bestimmten Neigungswinkels

1. Drücken Sie die Taste für die Sitzneigung, die dem gewünschten Winkel entspricht.




	Aufrichten Taste	Bringt den Sessel/die Fußstütze in eine gespeicherte Position.
	Zurücklehnen Taste	Zum Zurücklehnen in eine für die Massage geeignete Position
	Flach Taste	Zum Zurücklehnen in die Liegeposition.

Einstellung

1. Einstelltaste drücken.



2. Einstellungen nach Wunsch vornehmen.

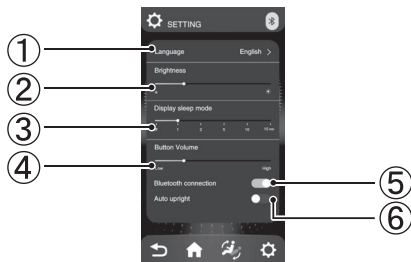

①	Language	Sprache einstellen	Anzeigesprache ändern
②	Brightness	Helligkeit	Helligkeit des Displays der Fernbedienung einstellen
③	Display sleep mode	Abschaltzeit	Sie können die Zeit einstellen, nach der sich der Bildschirm ausschaltet, wenn keine Aktivität auf der Fernbedienung erfolgt
④	Button Volume	Lautstärkesteuerung	Einstellen der Lautstärke der Betriebstöne der Fernbedienung
⑤	Bluetooth connection	Bluetooth Verbindung	Schaltet die Bluetooth-Funktion EIN/AUS
⑥	Auto upright	Stuhl automatisch aufrichten	Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Aufrichtfunktion nach Beendigung der Massage

Anwendung

Automatikprogramme

1. Gerät einschalten.




2. Drücken Sie „Automatikprogramme“, um ein Programm zu wählen.



【Startseite】



【Ganzkörperprogramm】

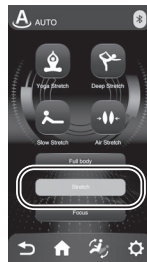

【Dehnprogramm】




【Teilprogramm】


3. Der Körperscan startet automatisch.



【Körpererkennung läuft】

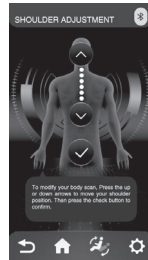

【Schulterposition einstellen】

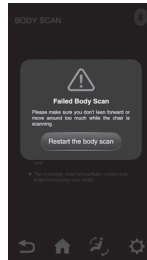


【Erkennungsfehler】





- Wenn der Körperscan fehlschlägt, drücken Sie „Körperscan wiederholen“, um den Körperscan zu wiederholen.
- Setzen Sie sich für einen korrekten Körperscan bitte tief hin und lehnen Sie sich gegen die Rückenlehne.
- Wenn die Schulterposition nicht korrekt ist, stellen Sie sie manuell ein, indem Sie die Oben oder Unten Taste drücken und bestätigen, um die Massage zu starten.

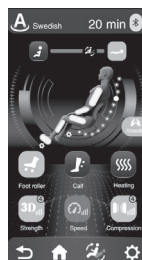4. Das Automatikprogramm startet.







【Massage Bildschirm】

● Startmenü





	Automatikprogramme	Wählen Sie aus 12 verschiedenen Automatikprogrammen: 4 für den ganzen Körper, 4 für Dehnungen und 4 für bestimmte Körperteile
	Manuelle Massage	Manuelle Massage starten Details siehe Seite 26

● Inhalt der Automatikprogramme





Ganzkörperprogramm

	Schwedisch	Eine gründliche und umfassende Massage, die Verspannungen, Müdigkeit und Erschöpfung im ganzen Körper löst.
	Sanft	Eine wohltuende Massage, die mit leichten Streichbewegungen und sanftem Druck Verspannungen löst.
	Tiefes Gewebe	Eine Massage, die tiefe Entspannung fördert und Muskelermüdung lindert
	Entspannung	Eine pflegende Massage mit weichen, fließenden Bewegungen

Dehnprogramm

	Yoga Dehnung	Entspannen und flexibler werden mit einem umfassenden Yoga Programm
	Tiefendehnung	Kräftige Dehnung des ganzen Körpers
	Langsame Dehnung	Erleben Sie einen tieferen Bewegungsradius mit intensiveren Dehnungen
	Passive Dehnung	Passive Dehnungstechniken sorgen für müheloses Dehnen mit Komfort

Fokusprogramm

	Nacken	Programm zur gezielten Nackenmassage
	Schulter	Programm zur gezielten Schultermassage
	Lendenwirbelsäule	Programm zur gezielten Massage des unteren Rückens
	Gesäß	Programm zur gezielten Massage des Gesäßes

Anwendung

Manuelle Massage

1. Gerät einschalten.



2. Manuelle Massage wählen.



【Startseite】

3. Manuelle Massage beginnt.



Anzeige der aktuellen
Massagetechnik

【Manuelle Massage Bildschirm】

- Nach Auswahl der manuellen Massage ist die Standardeinstellung Kneten.
- Informationen zur Einstellung der manuellen Massage finden Sie auf Seite 28.

- Massage Anpassung

Adjustment	Massage Anpassung Taste	Zum Einstellen der Massagetechnik, der Einstellung für die Luftmassage und des Massagebereichs.
------------	----------------------------	--

Massage anpassen


Automatikprogramme

1. Jeder Punkt kann nach Wunsch eingestellt werden.





- Im Automatikprogramm ist die Taste „Geschwindigkeit“ ausgegraut und kann nicht eingestellt werden.

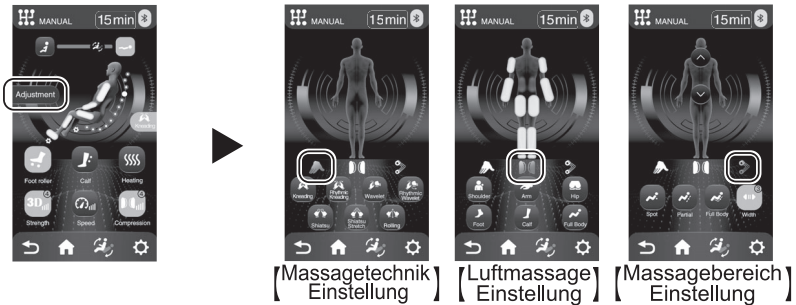Manuelle Massage









- Drücken Sie zum Einstellen der Massagetechnik, der Luftmassageeinstellung und des Massagebereichs die Taste „Einstellung“, um die gewünschten Optionen in 3 Kategorien auszuwählen.
- Nach einigen Sekunden der Inaktivität oder durch Drücken der „Zurück“ Taste kehren Sie zum Massagebetrieb Bildschirm zurück.


● Anpassung der Rückenlehne

	In die aufrechte Position	Durch Drücken der Taste hebt sich die Rückenlehne und die Beinstütze senkt sich.
	Taste für flache Position	Durch Drücken der Taste senkt sich die Rückenlehne und die Beinstütze hebt sich






● Massageoptionen im Massagebetrieb Bildschirm

	Fußrolle	Fußrolle EIN/AUS schalten
	Wade	Wadenrolle & Airbag Massage EIN/AUS schalten
	Heizung	Heizung EIN/AUS schalten
	Massageball Stärke	Mit jedem Tastendruck Massageintensität in 4 Stufen einstellen
	Massageball Geschwindigkeit	Mit jedem Tastendruck Massagegeschwindigkeit in 5 Stufen einstellen
	Luftmassage Stärke	Mit jedem Tastendruck Luftmassageintensität in 5 Stufen einstellen

● Massage Anpassung







	Massage Anpassung Taste	Zum Einstellen der Massagetechnik, der Einstellung für die Luftmassage und des Massagebereichs
---	-------------------------	--

● Massagetechnik Einstellung (nur manuelle Massage)






	Kneten	Knetmassage
	Rhythmisches Kneten	Knetmassage mit variabler Geschwindigkeit
	Wellenbewegung	Knet- und Klopfmassage
	Rhythmische Wellenbewegung	Knet- und Klopfmassage mit variabler Geschwindigkeit
	Shiatsu	Akupressur Massage
	Shiatsu Dehnung	Akupressur- und Dehnungsmassage
	Rollen	Rollende Massage

Massage anpassen

●Luftmassage Einstellung (nur manuelle Massage)

	Schulter-Airbags	Schulter-Airbags EIN/AUS schalten
	Arm-Airbags	Arm-Airbags EIN/AUS schalten
	Hüft-Airbags	Hüft-Airbags EIN/AUS schalten
	Fuß-Airbags	Fuß-Airbags EIN/AUS schalten
	Waden-Airbags	Waden-Airbags EIN/AUS schalten
	Ganzkörper-Airbags	Ganzkörper-Airbags gleichzeitig EIN/AUS schalten

●Massagebereich Einstellung (nur manuelle Massage)

	Punktmassage	Massagebereich wählbar.
	Teilmassage	
	Vollmassage	
	Massagekopf Entfernung	Die Entfernung der Massageköpfe kann in 3 verschiedenen Stufen per Tastendruck eingestellt werden (nur bei den Massagetechniken "Klopfen" und "Rollen" verfügbar).
	Massagekopf	Die Position der Massageköpfe kann nur bei den Massagetechniken „Punktmassage“ und „Teilmassage“ eingestellt werden.

●Bluetooth Audiowiedergabe Bedienungsanleitung

1. Rufen Sie das Hauptmenü des Smartphone auf, öffnen Sie „Einstellungen“, wählen Sie „Bluetooth“, aktivieren Sie „Bluetooth“ und automatisch „Nach neuen Bluetooth Geräten suchen“.
2. Das Gerät wird nach dem entsprechenden Bluetooth Modell (MR580) suchen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kopplung. Wenn Sie aufgefordert werden, das Gerät zu koppeln, wählen Sie „Koppeln“, um die Kopplung abzuschließen.
3. Öffnen Sie den Musik Player des Smartphone und wählen Sie einen Titel zum Abspielen aus.

Reinigung und Wartung

PU Leder und Kunststoffteile reinigen

Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch ab

■ Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine Chemikalien wie Verdüner, Benzin usw.

■ Beachten Sie bei der Verwendung von handelsüblichen Lederpflegemitteln (Tuch) die Gebrauchsanweisung.

■ Gehen Sie bei starker Verschmutzung des PU-Leders wie folgt vor:

① Tauchen Sie ein weiches Tuch in Wasser oder warmes Wasser mit 3% bis 5% neutralem Reinigungsmittel und wringen Sie es gründlich aus.

② Wischen Sie die Lederoberfläche mit dem oben genannten weichen Tuch ab.

③ Wischen Sie die Reinigungslösung mit einem weichen, mit sauberem Wasser getränkten und gut ausgewrungenen Tuch ab.

④ Wischen Sie mit einem ausgewrungenen weichen Tuch nach.

⑤ Lassen Sie es an der Luft trocknen.

■ Wenn Flecken schwer zu entfernen sind, tauchen Sie einen handelsüblichen Melaminschwamm in ein neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie das Gerät damit ab.

■ Verwenden Sie keinen Fön, um die Oberfläche zu trocknen.

■ Da die Farbe des Stoffes auf die Oberfläche des PU-Leders abfärbt, sollten Sie beim Abwischen des Stuhls mit Jeans und farbigen Stoffen vorsichtig sein.

■ Bewahren Sie diese Teile nicht über einen längeren Zeitraum zusammen mit Kunststoffen auf, da dies zu Verfärbungen führen kann.

■ PU-Leder kann sich verfärben. Wenn Sie Haarfärbemittel verwenden, decken Sie die betroffenen Teile mit einem Handtuch ab.



Fehlerbehebung

Problem	Wenn die Rückenlehne eine bestimmte Position erreicht hat, lässt sie sich durch Drücken der entsprechenden Verstelltaste nicht mehr verstellen und es ertönt ein kontinuierliches „Piep, Piep“.
Lösung	Aufgrund des Produktdesigns und der ergonomischen Anforderungen gibt es restriktive Schutzmaßnahmen für die Einstellung der Rückenlehne. Bei Erreichen der Grenze ertönt ein akustisches Signal.
Problem	Das Gerät funktioniert nicht mehr.
Lösung	Möglicherweise haben Sie das Gerät 45 Minuten lang ununterbrochen benutzt und der Überhitzungsschutz wurde aktiviert. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät 60 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder benutzen.
Problem	Das Gerät gibt während der Positionseinstellung ein quietschendes Reibegeräusch von sich.
Lösung	Für das gesamte Produkt werden umweltfreundliche und fortschrittliche korrosionsbeständige Materialien verwendet. Aufgrund der Eigenschaften dieser Materialien könnten an beweglichen Stellen leichte Reibungsgeräusche auftreten, was als normal anzusehen ist. Hinweis: Wenn während des Betriebes reißende Geräusche des Stoffes oder des Materials auftreten, ist der Betrieb sofort einzustellen und ein Fachmann zur Überprüfung hinzuzuziehen.
Problem	Die Massagerollen erreichen nicht den Schulter- oder Nackenbereich.
Lösung	Wenn der Kopf die Kopfstütze oder der Rücken die Rückenlehne nicht berührt, ist die Position der Schultern möglicherweise niedriger als die tatsächliche Position während der Erkennung der Körperform. Setzen Sie sich in die niedrigste Position des Stuhls, legen Sie den Kopf auf die Kopfstütze und wiederholen Sie den Vorgang.
Problem	Das Gerät ist beschädigt. Das Netzkabel oder der Netzstecker wird ungewöhnlich heiß.
Lösung	Wenden Sie sich umgehend an eine autorisierte Servicestelle, um Unfälle zu vermeiden.

Bei Unklarheiten oder Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an das zuständige Servicepersonal.

Technische Daten

Produktname	Galini
Modellname	MR580
Stromversorgung	AC220-240V 50-60Hz ; 140W ; Klasse I
Nennbetriebsdauer	15 Min.
Maximales Benutzergewicht	100kg
Herkunftsland	Hergestellt in China

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und es wurde festgestellt, dass es die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften einhält. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder anders aufstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät enthält ein zertifiziertes Funkübertragungsmodul:

FCC ID: 2AOC9-ZENBDM10A

IC: 27631-ZENBDM10A

 **Bluetooth**® Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und werden von SYNCA unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

"Benötigen Sie Hilfe?"

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie unseren Kundenservice vor Ort: (+49) (0)2234-9997-500"

S Y N C A
